

Roti®-Fix sprej pro cytologii

Fixační sprej pro cytologický materiál

- Cytologické stěry musí být ihned zafixovány pro předcházení artefaktům ve vzorcích
- Sprej je proto aplikován (cca 3 stříky) ze vzdálenosti 15-20 cm na ještě vlhké vzorky
- Po rehydrataci sestupnou alkoholovou řadou je možno vzorky barvit běžnými postupy (např. barvení dle Papanicolaou)

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS):

H225



Roti-Fix sprej pro cytologii

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Fix sprej pro cytologii	100 ml	lahvička s rozprašovačem	R.CL85.1

Roztok etanolu a 2-propanolu.